

PARI SINUS

Para Sinusite



PARI SINUS, o novo aparelho de inalação

- Aerossol pulsante para o nariz e seios perinasais
- Especialmente para a sinusite, rinossinusite, sinusite associada a bronquite crónica

Especialistas na inalação eficaz



PARI SINUS

Aerossol pulsante para os seios perinasais

No tratamento da sinusite, rinossinusite e sinusite associada a bronquite crónica, a terapia de inalação é de grande importância. Em adição às vantagens conhecidas da terapia com aerossóis, o **PARI SINUS** utiliza o efeito positivo de uma onda de pressão alternada na deposição dos aerossóis nos seios perinasais. Os aerossóis vibratórios atravessam bastante mais facilmente o infundíbulo etmoidal até aos seios nasais que os aerossóis tradicionais, transportando os medicamentos directamente para o local de actuação.



PARI SINUS
com nebulizador PARI LC SINUS,
Artigo n.º 028G1000

Características do aerossol:

TOR (Total Output Rate)	170 mg/min
MMD (diâmetro médio das partículas)	3,6 µm
Percentagem de Percentagem abaixo dos 5 µm	65%

Medições efectuadas com o Malvern Master Sizer X a 23 °C e 50% de humidade relativa. Meio vaporizado: 0,9 % NaCl (5 ml). Jet Flow 4,6 l/min

Indicações:

Doenças das vias respiratórias, por exemplo:

- Sinusites agudas e crónicas (de origem alérgica, viral ou bacteriana)
- Rinossinusite
- Sinusite associada a bronquite crónica

Substâncias que podem ser utilizadas na terapia de inalação com o **PARI SINUS**:

- Soluções salinas, por ex. soro fisiológico ou solução hipertónica de NaCl
- Soluções de „água do mar“
- Substâncias secretolíticas e mucolíticas
- Antibióticos
- Corticosteróides

Além da deposição de substâncias activas (medicamentos) nos locais de actuação desejados, a inalação de humidade traz benefícios adicionais às regiões afectadas.

- A humificação da mucosa nasal e dos seios perinasais
- A regeneração do epitélio ciliado
- A melhoria da clearance mucociliar

PARI SINUS

As características mais importantes:

- Para a terapêutica da sinusite, rinosinusite e sinusite associada a bronquite crónica
- Opção terapêutica não invasiva, protectora, não dolorosa
- Atinge directamente os seios perinasais através de um aerossol pulsante

Para mais informações sobre a nova **PARI SINUS**, entre em contacto com o distribuidor oficial **PARI** do seu país, ou directamente com a **PARI**.

PARI Service Center:

0049 (0) 8151 279-279

www.pari.de, E-Mail: info@pari.de

PARI Export Service Center



+ 49 (0) 8151 279-220

Telefone-nos...



... se tiver perguntas relativas à utilização, manuseamento, limpeza ou manutenção do seu inalador **PARI**.



... se desejar receber informações sobre peças sobressalentes de produtos **PARI** actuais ou mais velhos e/ou desejar saber onde as pode encomendar.



... se desejar informações adicionais ou tiver perguntas relativas à gama de produtos **PARI**.



PARI GmbH

Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg
Telefon +49 (0) 8151 279-0
Fax +49 (0) 8151 279-101



Na Internet encontra **PARI** em:

www.pari.de
E-Mail: info@pari.de

Especialistas na inalação eficaz

